


Když se design a funkce spojí dohromady ... dostanete **FUSION!**

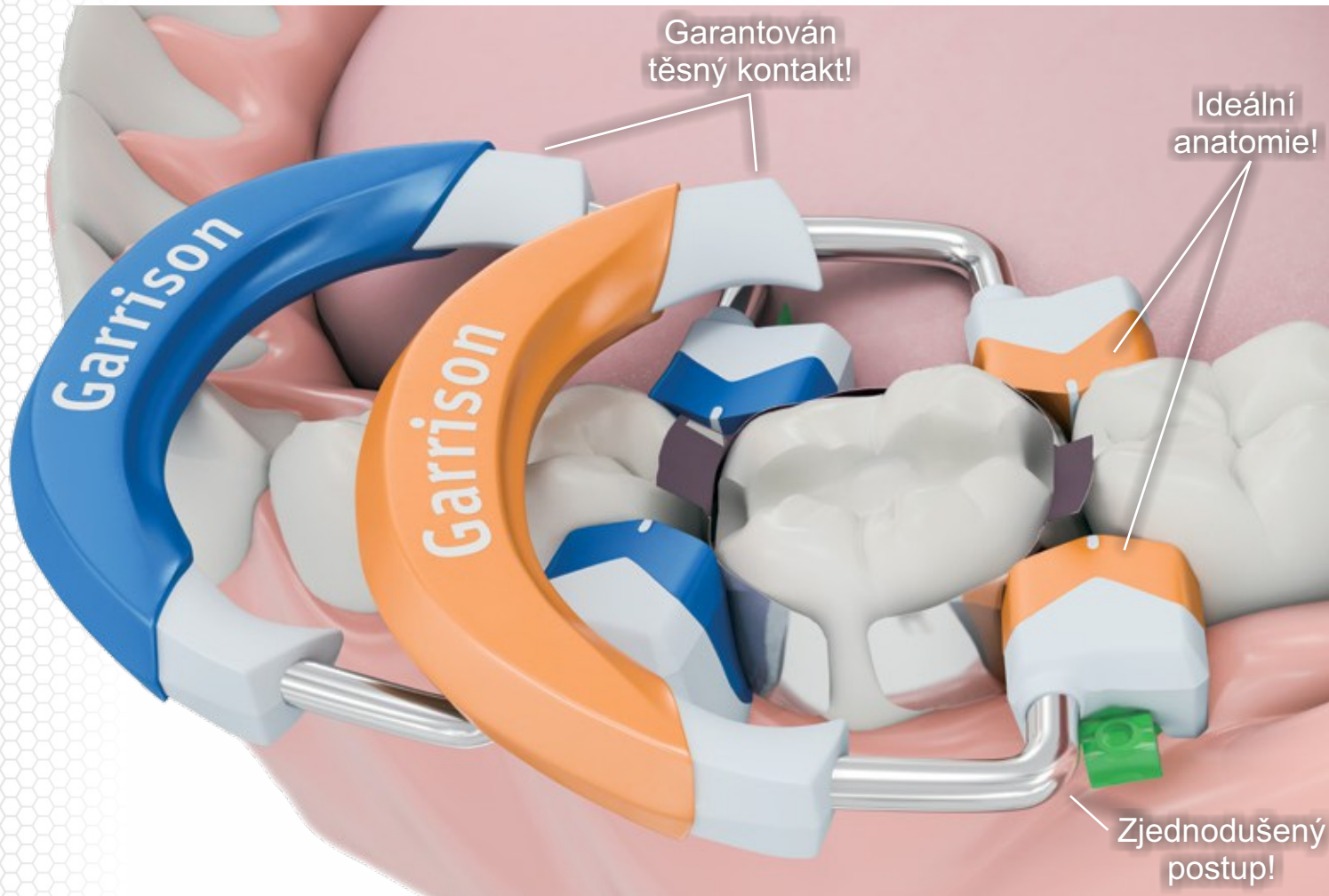

Garantován těsný kontakt!
Vysoká separační síla díky zlepšenému vývoji a výběru materiálu zaručuje těsný kontakt výplně se sousedním zubem.

Ideální anatomie!
Silikonové okraje kroužku Soft-Face™ se zlepšenou marginální anatomií přimknou konturované matricové pásky k zubu a zajistí perfektně tvarované výplně.


Zjednodušený postup!
Technologie Tru-Stack™ umožní jednodušší rozevření kroužku 3D Fusion™ a jeho nasazení na klínek. Rozšíření protiskluzových ploch Ultra-Grip™ garantuje bezproblémovou a intuitivní práci.

Composi-Tight® 3D Fusion™
Sekční matricový systém

Pouze sekční matricový systém vám zaručí takové výsledky!

Systém Tofflemire

- ❌ Není schopen obnovy proximální anatomie
- ❌ Slabý kontakt na marginálním hřbetu
- ❌ Velký otvor pro zbytky jídla
- ❌ Zvýšená pravděpodobnost zlomeniny, okluzní interference, recidivujících kazů a parodontálních onemocnění

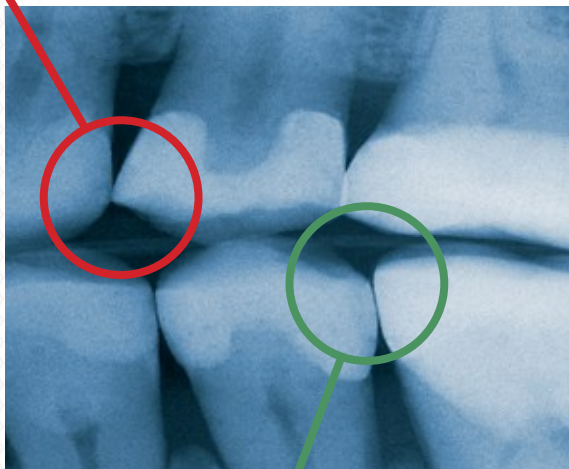

Sekční matricový systém Composi-Tight®

- ✓ Obslužně pohodlný systém
- ✓ Přirozeně tvarované pásky
- ✓ Anatomicky bezchybné kontakty
- ✓ Kontakty ve výšce obrysu
- ✓ Kroužky poskytují optimální separaci zubů zaručující vynikající těsné kontakty



Pouze Composi-Tight® 3D Fusion™ umožní intuitivní techniku bez frustrací!

1 Umístěte matricový pásek



Měkké trojrozměrně tvarované matricové pásky mají úchytky pro snadnější okluzní umístění a revoluční nelepivou vrstvu pro bezproblémové odstranění pásky.

2 Pevně zaklíinkujte



Ultra-adaptivní klínky Composi-Tight® 3D Fusion™ snadno vklouznou dovnitř, ale nevyklouznou ven. Jejich měkký, flexibilní vnější povrch se snadno přizpůsobí meziproximálním nepravidlostem zajišťující vynikající gingivální utěsnění.

3 Umístěte kroužek



Všechny tři separační kroužky Composi-Tight® 3D Fusion lze nasadit přes klínky. Díky rozšířené retenci Ultra-Grip™ zůstanou kroužky pevně na svém místě od distálních špičáků až po nejširší molární preparace.

Kompletně nový systém vytvořený i pro ty nejsložitější případy

Do nového návrhu bylo doslova nalito více než 20 let na pozici lídra trhu sekčních matic a neuvěřitelné množství zpětné vazby od uživatelů po celém světě. Všechna tato tvrdá práce vyústila v separační kroužky se značně vylepšeným výkonem a snadnou obsluhou.



Kopírování anatomie

Silikonové hroty Soft-Face™ se zlepšenou marginální anatomií přimknou matricové pásky k zubu pro bezproblémovou dostavbu.



Skládejte! Pro snadnější MOD a vícenásobné zubní rekonstrukce umožňuje technologie Tru-Stack™ umístit vysoký oranžový kroužek přes krátký modrý kroužek a obráceně.



Pevný úchop!


Všechny separační kroužky Composi-Tight® 3D Fusion™ mají rozšířenou retenci Ultra-Grip™, která je bezpečně zakotví na prakticky jakýkoli zub. Tyto kroužky zůstanou tam, kde je umístíte!



Neuvěřitelná životnost!

Díky vyšší odolnosti budou kroužky i po více než 400 aplikacích jako nové.

Širší indikace, širší úsměvy!

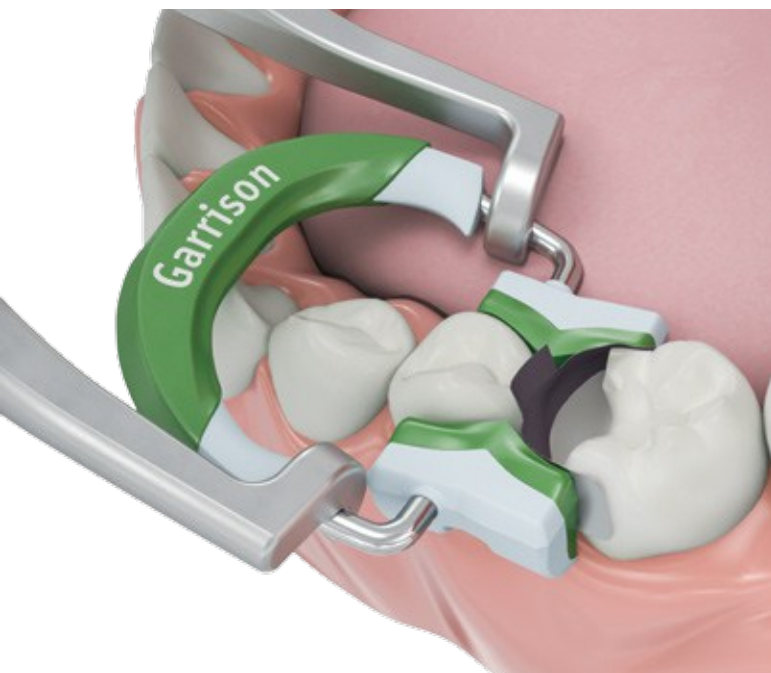

Světově první separační kroužek na široké preparace tvoří z Composi-Tight® 3D Fusion™ nejvšestrannější a uživatelsky nejpřívětivější matricový systém. Široký zelený kroužek výrazně zjednodušuje to, co bylo doposud jedním z nejnáročnějších kompozitních posteriorních výplní. Nyní můžete tyto velké preparace obnovit s jistotou dosažení vynikajícího kontaktu i kontury a to bez potřeby dodatečných zákroků.


Dokonalost matricového pásku!

Plně zakřivené matricové pásy Composi-Tight® 3D Fusion™ s nepřilnavým povrchem jsou trojrozměrně tvarované, ultra tenké a ideálně měkké - s takovými vlastnostmi snadno vytvoříte perfektní interproximální anatomii.



Lehce dovnitř i ven!

Úchytka Grab-Tab™ na středu okluzního okraje pásků zjednodušují umístění, zatímco nepřilnavá vrstva Slick Bands™ snižuje kompozitní přilnavost o 92%!

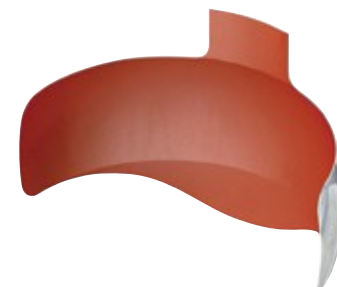

Ultra přizpůsobivé klínky

Kombinace adaptivních Soft-Face™ materiálů, pevného vnitřního jádra a pokročilých mechanických vlastností vytváří klínek, který skutečně funguje. Pokaždé.



Křídélka s důležitou funkcí
Měkká retenční křídélka se při zasouvání klínu hladce sklopí a za mezizubním prostorem odpruží zpět. Nechtěné vysouvání klínků patří minulosti.



Hluboko a zeširoka

Vylepšená subgingivální rozšíření a zvýšený záběr tvoří z tohoto pásku ideální kombinaci se zeleným širokým kroužkem. Nyní jste připraveni řešit i ty nejširší preparace!



Měkký povrch Soft-Face™

umožňuje tvarování klínu takovým způsobem, jakým žádný jiný klínek na trhu skutečně nemůže - dokonale se přizpůsobit interproximálním nepravidlostem.

Tuhý vnitřek

Tvrdá vnitřní struktura umožňuje snadné zasunutí a separaci zubů stejně jako tradiční klín.

Přesná kontrola s kleštěmi Composit-Tight 3D Fusion

Premiérové kleště z nerezové oceli s neuvěřitelnou odolností vám bez ohledu na velikost vašich rukou nebo jejich sílu umožní dokonalou kontrolu nad přesným umístěním extra silných 3D Fusion kroužků i na těch nejširších molárech.



Ergonomické pro všechny
Ať už jsou vaše ruce velké či malé, kleště Composit-Tight 3D Fusion vám vždy poskytnou potřebnou jistotu při umístění jakýchkoliv kroužků.

Dlouhodobá investice

Kovaná nerezová ocel zabraňuje únavě materiálu a zajišťuje neuvěřitelnou životnost těchto kleští.

Využití pro všechny

Přidaná hodnota kleští 3D Fusion je možnost jejich kombinace s jakýmkoliv kroužkem od jakéhokoliv výrobce.



**Pouze Garrison
vám poskytne
takto komplexní úvodní Kit!**

Composi-Tight 3D Fusion Matrix Kit (FX-KFF-00)

Balení:

- 1 x krátký modrý kroužek na premoláry
- 1 x vysoký oranžový kroužek na moláry
- 1 x široký zelený kroužek na široké kavity
- 70 x matricové pásky Composi-Tight 3D Fusion
- 80 x klínky Composi-Tight 3D Fusion
- 1 x aplikační kleště Composi-Tight 3D Fusion

Garrison
Dental Solutions

+420 727 986 104
office@puromed.cz
www.puromed.cz

© 2017 Garrison®
Dental Solutions LLC

Uživatelský návod

Sekční matricový systém Composi-Tight 3D Fusion™ je navržen tak, aby vytvářel těsné, anatomické kontakty kompozitních výplní třídy II. Konturované matricové pásky vytvářejí správnou anatomii zubů, zatímco tři typy kroužků umožňují požadovanou separaci zubů a přizpůsobení pásků pro těsný, přirozený kontakt.

Informace k patentům naleznete na
www.garrisonsdental.com/patents

Důležité pokyny pro čištění a sterilizaci

Kroužky Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™

Po použití a před sterilizací odstraňte všechny viditelné nečistoty. NEPOUŽÍVEJTE roztoky obsahující aceton nebo keton. Sterilizujte pouze v autoklávu.

Sekční matricové pásky Composi-Tight® 3D Fusion™

Matricové pásky jsou produkty k jednorázovému použití. Doporučujeme sterilizovat před použitím a to v autoklávu.

Nástroje & Kleště

Nástroje mohou být sterilizovány suchým teplem, v autoklávu nebo sterilizovány za studena.

Klíčky Composi-Tight® 3D Fusion™

Klíčky jsou produkty k jednorázovému použití. Dezinfikujte pouze sprejem. Nepoužívejte autokláv.

Pro kompletní sterilizační pokyny navštivte:
www.garrisonsdental.com/sterilization

Technika rekonstrukce II. třídy za použití kroužků Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™


- Umístěte matricový pásek Composi-Tight® 3D Fusion™.**
Vyberte takový matricový pásek, který se nejvíce blíží okluzněgingivální výšce zubu. Úchytka by měla být orientována směrem k okluznímu okraji a měla by se po umístění ohýbat nad vedlejší zub. (Obrázek 1)
- Vložte klínek Composi-Tight® 3D Fusion™.** Prstem přidržujte matricový pásek tak, aby se zabránilo uvolnění pásku při zasunutí klínku. Klínkujte pevně, poněvadž by přípravek s vysoce viskózní pryskyřici mohl pásek odtláčit. (Obrázek 2)
- Umístěte kroužek Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™.**
Zvolte takový kroužek, který je vhodný pro danou obnovu zubu. Roztáhněte kroužek pomocí aplikačních kleští *Composi-Tight 3D Fusion™ a umístěte jej přes klín. (Obrázek 3)
- Důležitá informace:** Přitlačte matricový pásek pevně do kontaktu s přilehlým zubem v požadované kontaktní oblasti.
- Dle pokynů výrobce aplikujte vámi preferovanou techniku** leptání, dezinfekce a bondování. Dle pokynů výrobce aplikujte vámi preferovaný pryskyřičný kompozit.
- Odstraňte kroužek, pásek a klínek.**
- Upravte a vyleštěte obnovený zub.**



Obrázek 1



Obrázek 2

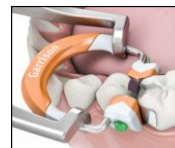

Obrázek 3



Obrázek 4

Skládání kroužků & Obnovy MOD

Oranžový a modrý kroužek jsou pod takovým úhlem, který jim umožňuje skládání k více-násobným a MOD zubním rekonstrukcím. (Obrázek 4)

*(Aplikační kleště Composi-Tight® 3D Fusion™, kód FXP01, udrží kroužek mnohem bezpečněji a poskytují dostatek síly k jejich rozevření. POZN.: Většina koferdamových kleští není schopna kroužky Composi-Tight® 3D Fusion™ pro jejich umístění dostatečně rozevřít.)