

Klirich® Pro/Klirich® Home

Periodontální ústní gel



PATENTOVANÝ
RECEPT



MĚKKÁ APLIKAČNÍ
KONCOVKA

KLIRICH® HOME: PERO URČENÉ
PRO NÁSLEDNOU LÉČBU NAVAZUJÍCÍ
NA STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK.



Indikace

Klirich® Pro je ústní gel založený na přírodní bázi. Klirich® Pro a Klirich® Home řeší mnohočetné problémy ústní dutiny a dásní.

Klirich® Pro je periodontální gel určený k aplikaci v ústní dutině dospělých pacientů za účelem snížení zánětlivé reakce - u gingivitidy, krvácení, ústupu dásní, parodontální choboty.

Doporučen v případech mukositivity, periimplantitidy a po kyretáži.

Výhody

- Složeno z přírodních ingrediencí a výtažků s výjimečnými vlastnostmi: protizánětlivý, protikrvácivý, antibakteriální.
- Ulevuje při citlivých dásních.
- Redukuje termální citlivost zubů na teplo i chlad.
- Snižuje krvácivost dásní.
- Ochranný film gelové struktury zajišťuje lepší retenci v ústní dutině.
- Efektivní ihned, s dlouhotrvajícím účinkem.
- Bez nežádoucích pocitů během i po užití.


Clinical Excellence

ITENA®
CLINICAL PRODUCTS

Klinický postup



① Zatřepáním stříkačky Klirich® Pro smíchejte ingredience uvnitř. Zamkněte periodontální aplikační koncovku.

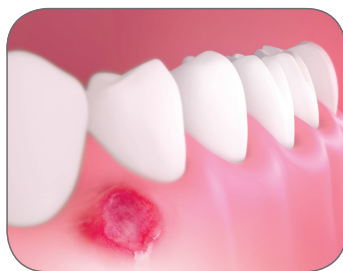


② Aplikuje malé množství gelu na postižené místo.



③ Vmasírujte do dásně po dobu alespoň 15 vteřin, než se gel absorbuje.



④ Nechte působit po dalších 15 vteřin, bez masírování a polykání.

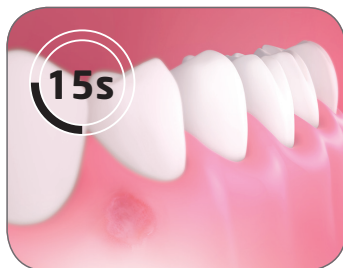

⑤ Odsajte, počkejte opět 15 vteřin a vypláchněte přebytek gelu vodou.

“91% dotázaných pacientů by jej v případě periodontálního zanícení užilo znovu.*”


* Klinická studie N°15E 1132.

Klirich® Pro zničí od 99.9% do 99.999% všech testovaných mikro-organismů.*


* Porphyromonos gingivalis, Prevotella melaninogenica, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Candida albicans, Herpès virus typu 1. Mikrobiologická studie (nezávislá laboratoř).

“Výrazný pokles gingiválního zanícení a bolesti již po 3 dnech od užití.”

Modifikovaný Gingivální Index

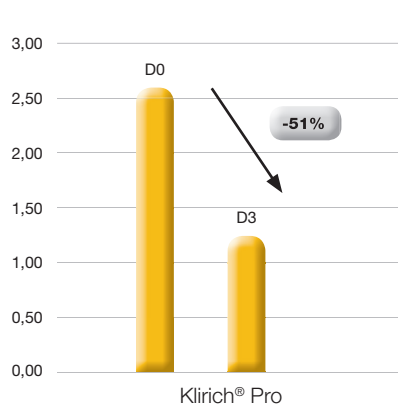

Vyhodnocení bolesti (bodová škála)

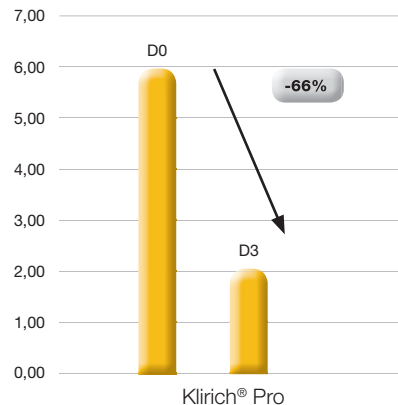

REFERENCE

Klirich® Pro

2 x 3 ml stříkačka Klirich® Pro + 12 měkkých jednorázových aplikačních koncovek

KKLIRC2S

Klirich® Home

3 x 4 ml pero Klirich® Home

KLIR-H35

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení: Periodontální ústní gel založený převážně na rostlinách s mimořádnými vnitřními vlastnostmi:

- extrakt ze semen a slupky Grapefruitu
- kurkumin
- extrakt z Měsíčku lékařského
- extrakt ze Stévie sladké
- extrakt z listů Kontryhelu obecného
- hřebíčkový olej
- cetylpyridiniumchlorid
- kyselina hyaluronová
- hydrogenuhličitan sodný



Class I medical devices CE marking for dental healthcare. For dental healthcare professional use only. Instructions for use to be read carefully before using. Date : 07/22/2016

